



## **SPECIÁLIS UNIVERZÁLIS HIALURON-SAV TARTALMÚ KONTAKTLENCSÉ TISZTÍTÓ FOLYADÉK – EXTRA NEDVESÍTŐHATÁSSAL**

Valamennyi típusú (SiH is) lágy kontaktlencse specifikus tisztítási és kondicionálási kezelésére. Fertőtlenít, tisztít, eltávolítja a fehérje lerakódásokat, nedvesít és öblít.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

1. Mosson kezet, mielőtt a lencsékhez érne.
2. Vegye ki az egyik kontaktlencsét és öblítse azt le néhány másodpercen keresztül.
3. Dörzsölni nem szükséges, azonban ha azt Önnek javasolták, akkor csepegtessen a lencsére három-négy cseppet az univerzális ápolófolyadékból és ezt 10-20 másodpercen keresztül finoman dörzsölve, tisztítsa le.
4. Töltse fel a kontaktlencse tartót megfelelő mennyiségű ápoló folyadékkal úgy, hogy a megtisztított lencse behelyezésekor, ez teljesen belepje a lencsét, majd helyezze a tartóba a megtisztított lencsét.
5. Vegye ki a másik kontaktlencsét és ismétlje meg ezeket a műveleteket.
6. A megfelelő fertőtlenítés érdekében, a kontaktlencséket tartsa egész éjszaka, de legalább hat órán keresztül az ápolófolyadékkal megtöltött, zárt tartóban.
7. Behelyezés előtt, néhány másodpercen keresztül, öblítse át a termékkel a kontaktlencséket. Ha a lencse viselésekor, homályosan lát vagy a szem kiszáradását észlelné, megnedvesítheti a kontaktlencséket. Csepegtessen közvetlenül ezekre, vagy közvetlenül a szembe, egy-két csepp terméket, majd pislogjon többször.

### **FIGYELMEZTETÉSEK**

- A lencsék újbóli fertőtlenítéséhez, öntse ki az előző napi, fennmaradó ápolófolyadékot a tartóból, majd töltse ezt fel új folyadékkal.
- Ha a terméket nem használja, jól zárja le a tetejét, és ne engedje, hogy a cseppentője bármilyen felülettel érintkezzen.
- A terméket megkezdése után 90 nappal ne használja.
- A terméket a gyermekektől tartsa távol.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik összetevőjére allergiás.
- Ha a termék használata folyamatos kellemetlenséget vagy irritációt vált ki, vegye ki a kontaktlencséket, ne használja tovább a terméket és forduljon kontaktlencse szakértőhöz.
- A kontaktlencséket, maximum 30 napon át, lehet a zárt tartóban tárolni.

### **ÖSSZETÉTEL**

Pufferolt sóoldat, mely a következőket tartalmazza: nátrium citrát, poloxamer 407, nátrium-hialuronát, dinátrium-edetátot és 0,0001%-os polihexanid