

Használati utasítás a **Naclens** fehérje eltávolító tablettához



Az **Naclens** fehérjeoldó tabletta kizárólag kontaktlencséhez használható!

A tabletta alkalmas a lágy- ill. kemény (PMMA és gázáteresztő) kontaktlencsén lerakódó proteinek és lipidek eltávolítására. Használatával a kontaktlencse felülete tisztább lesz, ezáltal megnöveli a lencse élettartamát, komfortosabbá teszi a viseletet. Használatával megelőzhetőek a protein ill. lipid lerakódások által kiváltott lencseviselési és szemészeti problémák kialakulása.

Lágy kontaktlencsék esetében, Naclens fehérjeoldó tabletta valamennyi az optikai üzletekben kapható lágy kontaktlencse ápoló szerhez, ill. fiziológiás sóoldattal is használható.

Ne használja peroxidos rendszerekkel!

Kemény kontaktlencse esetében a lencsét fiziológiás sóoldattal együtt használjuk!

A tabletta használata lágy kontaktlencse esetében:

- Használat előtt mindig mosson kezet.
- Távolítsa el a kontaktlencsét a szeméből.
- Tegyen lencsénként 1 –1 tablettát a tároló tokba, majd töltsen fel tiszta ápoló folyadékkal. (Fehérje oldáshoz fiziológiás sóoldat is használható)
- Hagyja a lencsét minimum 2 órán keresztül az oldatban.
- **A fehérjeoldást követően, öblítse le a lencsét az Ön által használt oldattal, vagy fiziológiás sóoldattal.**
- A lencsét friss oldatba téve helyezze vissza a tároló tokba, vagy helyezze a szemére
- **Ha fehérjeoldást követően a lencsét felhelyezve bármilyen rendellenességet érez, a lencsét vegye ki a szeméből, öblítse le újra, majd ezt követően használja ismét. Ha a probléma nem szűnne meg, a lencsét ne viselje, és keresse fel a lencsét illesztő szakembert.**

A tabletta használata kemény kontaktlencse esetében:

Megegyezik a fent leírtakkal, azonban, a tablettát a lencse tároló oldatában vagy fiziológiás sóoldatban oldja fel. Egy lépcsős oldat szintén alkalmas a lencse feloldására.

Összetétel:

Protease, Lipase, Pronase, EDTA.

Ne használja a lencsét, ha érzékeny valamely összetevőjére. A tablettát ne nyelje le! Gyermkektől elzárva tartandó!

Gyártó: DISOP ALCOBENDAS (Valdelaparra 31-A, Madrid, Spanyolország) CE0318
Forgalmazza: Intercont-Optika Kft, (1576. Bp. Pf 48.) [www. Intercont-optika.hu](http://www.Intercont-optika.hu)