

Használati utasítás az ACUAISS ULTRA nedvesítő szemcsepphez



- Az ACUAISS ULTRA szemcsepp a kontaktlencse komfortosabb viseletének segítésére készült.
- Használja az ACUAISS ULTRA cseppet, ha száraznak érzi a szemét, ill. ha a lencsét hosszán viseli.
- Felbontás után 90 napig használható. Gyermekektől elzárva tartandó!

Összetétel: 0,15% Hialuron-sav, sodium chloride, disodium phosphate, monosodium phosphate, disodium edetate, tisztított víz

Használata:

1. Használat előtt mindig mosson kezet!
2. Cseppentsen 1-2 cseppet a szemébe, majd tartsa a szemét rövid ideig csukva.
3. A kicsorduló folyadékot törölje le az arcáról.
4. SOHA NE ÉRINTSE A CSEPPENTŐ VÉGÉT, ill. AZ SOHA NE ÉRJEN A SZEMÉHEZ!
5. Ne érintse meg ujjjaival a cseppentő nyílást!
6. Használaton kívül, mindig tartsa jól lezárva a flakont!
7. Ha bármilyen gyógyszert használ, az Acuaiss Ultra használata előtt konzultáljon orvosával!
8. Ha a használat során bármilyen rendellenességet érez (kipirosodik a szeme, csípő, égő érzés, a használatot függesse fel és keressen fel szemorvost.
9. A becseppentést követően átmenetileg homályosabb lehet a látás, ami pár perc elteltével megszűnik.
10. Gyermekektől elzárva tartandó!

Gyártó: DISOP ALCOBENDAS (Valdelaparra 31-A, Madrid, Spanyolország) CE0546

Forgalmazza: Intercont-Optika Kft, www.intercont-optika.hu