

HIDRO HEALTH



SOLUZIONE UNICA SPECIALE PER
LENTI IN SILICONE IDROGEL

ΥΓΡΟ ΣΕ ΕΝΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ
ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ALL-IN-ONE VLOEISTOF SPECIAAL
VOOR SILICONE HYDROGEL
LENZEN

ALT-I-EN OPLØSNING SPECIELT
TIL KONTAKTLINSE AF
HYDROGEN SILIKONE

SPECIÁLIS UNIVERZÁLIS
SZILIKON-HIDROGÉL
KONTAKTLENCSÉ TISZTÍTÓ
FOLYADÉK



MAGYAR

SPECIÁLIS UNIVERZÁLIS SZILIKON-HIDROGÉL KONTAKTLENCSÉ TISZTÍTÓ FOLYADÉK

Szilikon-hidrogél lágú lencsék specifikus tisztítási és kondicionálási kezelése. Fertőtlenít, tisztít, eltávolítja a fehérje lerakódásokat, nedvesít és oblit.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Mosson kezet, mielőtt a lencsékhez érne.
2. Vegye ki az egyik kontaktlencsét és öblítse azt le néhány másodpercen keresztül.
3. Csepegtessen a lencsére három-négy cseppet az univerzális ápolófolyadékából és ezt 10-20 másodpercen keresztül finoman dörzsölve, tisztítsa le.
4. Töltse fel a kontaktlencse tartót megfelelő mennyiségű ápoló folyadékkal úgy, hogy a megtisztított lencse behelyezésekor, ez teljesen belepje a lencsét, majd helyezze a tartóba a megtisztított lencsét.
5. Vegye ki a másik kontaktlencsét és ismételje meg ezeket a műveleteket.
6. A megfelelő fertőtlenítés érdekében, a kontaktlencséket tartsa egész éjszaka, de legalább hat órán keresztül az ápolófolyadékkal megtöltött, zárt tartóban.
7. Behelyezés előtt, néhány másodpercen keresztül, öblítse át a termékkel a kontaktlencséket.

Ha a lencse viselésekor, homályosan lát vagy a szem kiszáradását észlelné, megmedvesítheti a kontaktlencséket. Csepegtessen közvetlenül ezekre, vagy közvetlenül a szembe, egy-két csepp terméket, majd pislogjon többször.

FIGYELMEZTETÉSEK



- A lencsék újbóli fertőtlenítéséhez, öntse ki az előző napi, fennmaradó ápolófolyadékot a tartóból, majd töltsé ezt fel új folyadékkal.
- Ha a terméket nem használja, jól zárja le a tetőjét, és ne engedje, hogy a cseppentője bármilyen felülettel érintkezzen.
- A terméket megkezdése után 90 nappal ne használja.
- A terméket a gyermekektől tartsa távol.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik összetevőjére allergiás.
- Ha a termék használata folyamatos kellemetlenséget vagy irritációt vált ki, vegye ki a kontaktlencsét, ne használja tovább a terméket és forduljon kontaktlencse szakértőhöz.
- A kontaktlencséket, maximum 30 napon át, lehet a zárt tartóban tárolni.

ÖSSZETÉTEL

A folyadék, nátrium-kloridot, mononátriumfoszfátot, nátriumfoszfátot, nátrium-citrátot, poloxamert, macrogol hidroxil-szteréátot, 0,2%-os dinátrium-edetátot és 0,0002%-os polihexametilén-biguánidot tartalmaz.